

Kurzanleitung Antigen-Selbsttest

Produkt: COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab)
Hersteller: Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.



Vorbereitung

1

Verschlussfolie vom Röhrchen entfernen und Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)




Probennahme (bei Zimmertemperatur)

2

Abstrichtupfer nacheinander in beide Nasenlöcher etwa 2,5 cm einführen, jeweils fünfmal gegen die Naseninnenseite drehen

Den Tupfer nicht tiefer einführen, wenn Widerstand spürbar ist

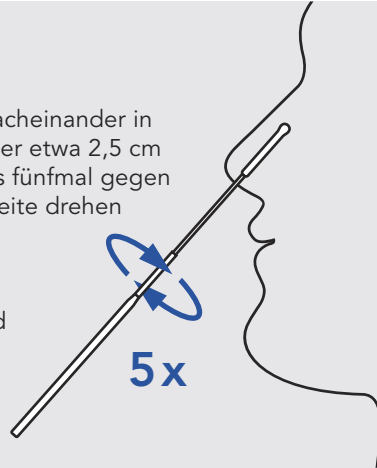


Probenbehandlung

3

mind. 8-10x

Abstrichtupfer in das Röhrchen einführen, mindestens acht- bis zehnmal drehen und dabei gegen die Röhrchenwand drücken

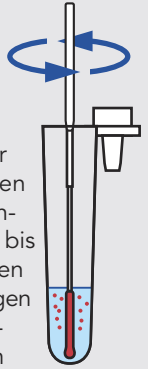

Probenbehandlung

4


Abstrichtupfer entnehmen und dabei Röhrchen mittig zusammenpressen, um Flüssigkeit vom Tupfer abzustreifen

Anschließend Tropfkappe fest aufsetzen



5

Drei Tropfen in die Probenvertiefung auf der Testkassette geben

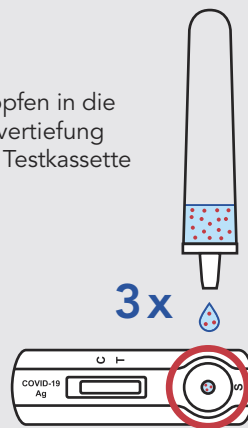

6

Ergebnis ablesen


nach 10-15 min



Sind mehr als 20 Minuten vergangen, ist der Test ungültig und muss wiederholt werden

Auswertung Testergebnis

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

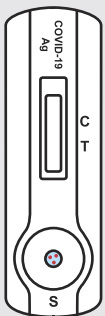


Negativ

Farbige Kontrolllinie (C)



keine Infektion nachweisbar

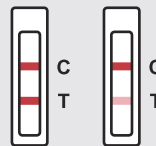


Positiv

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)



Verdacht auf Infektion

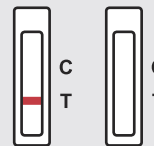

Ungültig / unklar

Keine Kontrolllinie (C)



Test wiederholen

Entsorgung



Verwendete Testkits in einem verschlossenen Beutel im Hausmüll entsorgen